

Lista de referencias de CDS

Requisitos de reprocesado para endoscopios flexibles termolábiles



Directrices relacionadas con CDS

Requisitos de reprocesado para endoscopios flexibles termolábiles

(España)



Sala de intervenciones	Área de descontaminación				
Limpieza previa	Limpieza manual*	Desinfección manual o LDE	Secado/almacenaje/ Esterilización	Observaciones	Fuente
Inmediatamente después de finalizar el procedimiento del paciente	Preferentemente detergentes enzimáticos	Reprocesado manual o en LDE Principalmente desinfectantes basados en PAA	La esterilización EtO es infrecuente, a diferencia de métodos alternativos como el LTSF y H ₂ O ₂ (Sterrad ASP y Steris V-Pro)		Recomendaciones AEEED: Limpieza y desinfección en endoscopia gastrointestinal (2013) https://hospitecnia.com/sites/default/files/158829221021588292210.pdf

Leyenda:

LDE - lavadora desinfectadora de endoscopios (limpieza y desinfección automática/mecánica químio-térmica)

GDA – glutardialdehído

PAA – ácido peracético

ClO₂ – dióxido de cloro

LCS – esterilización química líquida

EtO – óxido de etileno

LTSF – vapor a baja temperatura con formaldehído

H₂O₂ – peróxido de hidrógeno

OR – quirófano

EHEF – Foro Europeo de Expertos en Higiene

* Obligatorio, incluso en el caso del procesado con una LDE

Lista de directrices relacionadas con CDS - España

Dado que los conocimientos médicos aumentan constantemente, es posible que sea necesario hacer cambios o modificaciones técnicas en el diseño, las especificaciones, los accesorios y las ofertas de servicio. Esta guía rápida de referencia es un mero resumen de algunos pasos importantes del procedimiento y/o información del producto. Esto no reemplaza las instrucciones de uso. Los usuarios de este producto deben observar en todo momento la información de obligado cumplimiento para el producto, que se encuentra, en particular contenida en las etiquetas y las instrucciones de uso.

OLYMPUS

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

Postbox 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

Wendenstrasse 20, 20097 Hamburg, Germany

Phone: +49 40 23773-0, Fax: +49 40 233765

www.olympus-europa.com