

## EndoPreZyme

Reinigungsmittel für die manuelle Vorreinigung vor der maschinellen  
Aufbereitung



Für flexible Endoskope, Endoskopie-Zubehör und thermostabile (chirurgische) Instrumente.  
Für Tauch- und Ultraschallbäder geeignet.



# EndoPreZyme

## Ausgezeichnete Reinigungsleistung

Die richtige Reinigung ist ausschlaggebend für den Aufbereitungserfolg. Aufgrund seiner enzymatischen Formulierung bietet Olympus EndoPreZyme eine ausgezeichnete Reinigungsleistung vor der maschinellen Aufbereitung, was umfangreiche Tests belegen. Es entfernt Endoskopie-spezifische Verschmutzungen, wie etwa Rückstände von Röntgenkontrastmitteln, Entschäumern, Rachenanästhetika, Gleitmittelgelen und Hämostasessprays.

## Materialverträglichkeit

Die Materialverträglichkeit des pH-neutralen Reinigungsmittels sorgt für eine längere Lebensdauer der flexiblen Endoskope von Olympus und anderen führenden Herstellern.

## Prozessoptimierung

EndoPreZyme verkürzt und optimiert den gesamten Ablauf der Aufbereitung. Durch Verwendung dieser Lösung entfällt das Abspülen vor der maschinellen Aufbereitung in einer Olympus ETD-Maschine.

## Anwenderfreundlich

Die Rezeptur von EndoPreZyme ist schaumarm und stellt somit bei der manuellen Vorreinigung eine gute Sicht auf die Instrumente sicher. Die Dosiermenge kann an den individuellen Verschmutzungsgrad Ihrer Instrumente angepasst werden (5–15 ml/l).



EndoPreZyme		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Dosierung</b>	5–15 ml/l (0,5–1,5 %)*	
<b>Einwirkzeit</b>	5–10 min	
<b>Temperatur</b>	bis zu 35 °C	
<b>pH-Wert</b>	ca. 7,1**	
<b>Haltbarkeit</b>	2 Jahre	
<b>Bestellinformationen</b>		
<b>Artikelnr.</b>	WD00235A	WD00236A
<b>Artikelbezeichnung</b>	EndoPreZyme, 6 x 2 l	EndoPreZyme, 2 x 5 l
<b>Inhalt</b>	Reinigungsmittel; pH-neutral mit Enzymen; 6 x 2-l-Flaschen	Reinigungsmittel; pH-neutral mit Enzymen; 2 x 5-l-Kanister

\* Es wird Wasser mit einer Härte von <3°dH empfohlen; die Härte sollte 20°dH nicht überschreiten.

\*\*Anwendungslösung in vollentsalztem Wasser bei einer Konzentration von 5 bis 15 ml/l

Da das medizinische Wissen ständig wächst, können technische Modifikationen oder Änderungen des Produktdesigns, der Produktspezifikationen, des Zubehörs und des Dienstleistungsangebots erforderlich sein.

DISTRIBUTOR

**OLYMPUS**

**OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH**

Wendenstraße 20  
20097 Hamburg, Deutschland  
Telefon: +49 40 23773-4777  
Fax: +49 40 23773-503303  
E-Mail: kundenberatung@olympus.de  
www.olympus.de

**OLYMPUS AUSTRIA GES.M.B.H.**

Shuttleworthstraße 25  
1210 Wien, Österreich  
Telefon: +43 1 29101-500  
Fax: +43 1 29101-400  
E-Mail: endoskopie@olympus.at  
www.olympus.at

**OLYMPUS SCHWEIZ AG**

Richtring 30  
8304 Wallisellen, Schweiz  
Telefon: +41 44 94766-81  
Fax: +41 44 94766-54  
E-Mail: medical.ch@olympus.ch  
www.olympus.ch

HERSTELLER

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG,  
Mühlenhagen 85,  
20539 Hamburg, Deutschland