

Kolonoskop

CF-HQ1100DL/I

Doskonałe narzędzie do rutynowej kolonoskopii




Doskonałe narzędzie do rutynowej kolonoskopii

Diagnostyka optyczna wspomagana przez Dual Focus i NBI


Dual Focus, unikalne rozwiązanie firmy OLYMPUS, pozwala użytkownikowi wybrać żądaną głębokość obserwacji i zapewnia powiększone obrazy w trybie bliskiej głębi ostrości — wystarczy nacisnąć przełącznik na endoskopie. Zapewnia wysoce wiarygodną optyczną ocenę zmian w połączeniu ze sprawdzoną obserwacją NBI (obrazowanie wąskopasmowe).

Lepsza jakość obrazu i innowacyjny tryb obserwacji z CV-1500


Gdy CF-HQ1100DL/I jest połączony z procesorem wideo CV-1500, źródło światła procesora złożone z 5 diod LED oferuje innowacyjne tryby obserwacji — TXI (obrazowanie z ulepszeniem tekstury i koloru), RDI (czerwone obrazowanie dichromatyczne) i NBI (obrazowanie wąskopasmowe), a system redukcji szumów umożliwia wyraźną obserwację z mniejszym szumem.

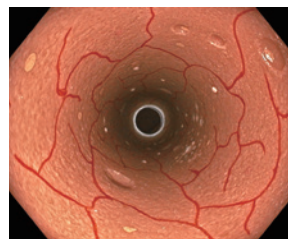

TXI

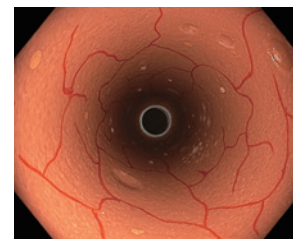

Białe światło

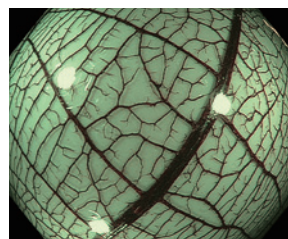

NBI, bliska głębia ostrości

Łatwy dostęp do
zdalnego przełącznika 2




Łatwy dostęp do pokręćła
regulacji odchylenia

ErgoGrip

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt zapewnia wygodny i stabilny chwyt, mniejszą masę i łatwiejszy dostęp do pokręteł regulacji odchylenia i przełączników endoskopu.

Inne cechy


- RIT (technologia insercji responsywnej)
- Kompatybilny ze ScopeGuide · Kąt widzenia 170°
- WaterJet · Wodoodporne złącze One-touch

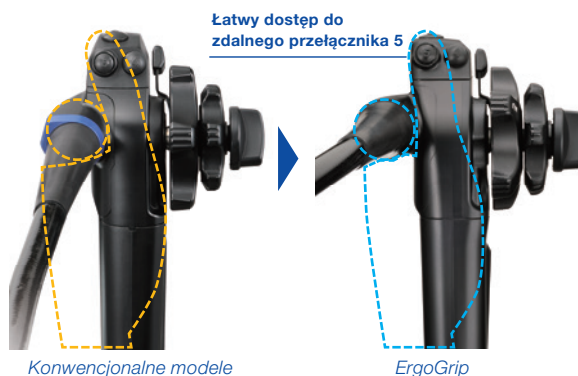

Konwencjonalne modele

ErgoGrip

Dane techniczne			
System optyczny	Pole widzenia	Tryb normalnego ostrzenia: 170° Tryb zbliżeniowego ostrzenia: 160°	Część ruchoma Zakres odchylenia W górę 180° / W dół 180° / W prawo 160° / W lewo 160°
	Kierunek widzenia	Widok w przód	
	Głębina ostrości	Tryb normalnego ostrzenia: 5–100 mm Tryb zbliżeniowego ostrzenia: 2–6 mm	
Sonda endoskopowa	Średnica zewnętrzna końca dystalnego	ø 13,2 mm	Długość całkowita L: 2005 mm l: 1655 mm
	Powiększenie końca dystalnego		
Kanał roboczy	Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej	ø 12,8 mm	System kompatybilny Procesor wideo OLYMPUS CV-1500 Procesor wideo OLYMPUS CV-190/CV-190 Plus Źródło światła ksenonowego OLYMPUS CLV-190
	Długość robocza	L: 1680 mm l: 1330 mm	
	Wewnętrzna średnica kanału	ø 3,7 mm	
	Minimalna widzialna odległość*1	4 mm (Tryb normalnego ostrzenia)	
Pomocniczy kanał wody	Kierunek, z którego akcesoria do endoterapii są wprowadzane i wycofywane z obszaru obrazu endoskopowego		*1 Odległość od dystalnego końca endoskopu.
	Kierunek, z którego w obrazie endoskopowym pojawia się strumień wody		

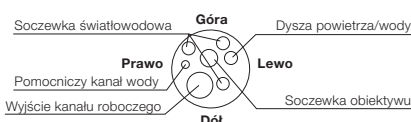

KOLONOSKOP OLYMPUS CF-HQ1100DL/I

Firma Olympus zastrzega sobie prawo do błędów, modyfikacji i zmian w ofercie usług i/lub produktów.