

LIMPIEZA DEL MANGO GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

Este documento es solo una guía de consulta rápida. Esta guía no exime de la lectura y el conocimiento de todo el manual de instrucciones de uso incluidas con el sistema DIEGO ELITE. Olympus no puede proponer ni recomendar ninguna acción que difiera de las instrucciones de uso o que no esté incluida en las mismas.

PRELAVADO

Limpie la superficie exterior del mango, el cable y el conector con una solución de limpieza enzimática, agua esterilizada o agua corriente inmediatamente después del uso.

LIMPIEZA MANUAL

- 1 Sumerja completamente el mango, el cable y el conector en la solución de limpieza. Déjelos en remojo durante diez minutos. Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante acerca de la temperatura y el factor de dilución de la solución de limpieza.



- 2 Mientras estén sumergidos, friegue suavemente las áreas que se indican a continuación con cepillos adecuados (artículo EG70338009 del kit de limpieza para mangos).



Rueda dentada



Interior del mecanismo de sujeción de la cuchilla



Conexión de 3 pines



Terminal del conector del mango

LIMPIEZA DEL MANGO: GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

- 3** Friegue con un cepillo de cerdas de nailon la zona en la que se encuentran el logotipo de Olympus y la referencia.



- 4** Accione el mecanismo de sujeción de la cuchilla.



- 5** Haga circular agua fría potable, desionizada o destilada por el interior del mango; a la vez, accione el mecanismo de cierre mientras enjuaga. Asegúrese de que el agua salga por todos los orificios de drenaje.

- 6** Utilice alcohol isopropílico al 70 % para limpiar y aclarar el mango, el cable de alimentación y el conector. Aclare el exterior para eliminar cualquier residuo restante.



- 7** Seque las piezas por completo con un paño que no deje pelusa. Inspeccione visualmente el conjunto del mango para ver si quedan residuos y repita el procedimiento de limpieza si es necesario.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Como alternativa a la limpieza manual, puede realizarse una limpieza automática en un sistema limpiador desinfectante automático.

- 1** Coloque el mango y el cable en la bandeja de la lavadora o en la bandeja específica (referencia EGMDHPTRAY).
- 2** Debe seleccionarse el ciclo Vario TD de la lavadora. Tras la limpieza automática, inspeccione visualmente el mango para ver si quedan residuos y repita el procedimiento de limpieza si es necesario.

ESTERILIZACIÓN

El mango está diseñado para poder esterilizarlo con vapor en un autoclave. Puede esterilizarse envuelto o sin envolver.

Esterilización por gas

Ciclo	Gravedad	Preaspirado
Temperatura	132 °C	132 °C
Tiempo	15 minutos	4 minutos
Tiempo de secado	60 minutos	30 minutos

Nota: Para satisfacer los requisitos internacionales, nacionales, regionales o de los centros sanitarios, el mango puede procesarse a temperaturas de hasta 137 °C sin que sufra daños.

ALMACENAMIENTO

Para evitar que el mango sufra daños, hay que secarlo completamente antes de proceder a su almacenamiento.

Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.

OLYMPUS

OLYMPUS IBERIA S.A.U.
Plaza Europa 29-31, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España
Tel.: +34 9 02 44 47 04
Fax: +34 9 32 00 95 80
E-mail: oes.marketingendo@olympus.es
www.olympus.es, www.olympus.pt

OLYMPUS LATIN AMERICA, INC.
6100 Blue Lagoon Drive, Suite 390
Miami FL 33126-2087, USA
Tel.: +1 305 260 4244
Fax: +1 305 266 9168
E-mail: cirugia@olympus.com
www.olympusamericalatina.com



E0492414 · 200 · 03/16 · PR · ED