

Videocolonscopio

CF-XZ1200L/I

Colonscopio innovativo con ingrandimento ottico 135x*1




Colonscopio innovativo con ingrandimento ottico 135x*1

Ingrandimento ottico 135x

Il modello GIF-XZ1200L/I è un colonscopio a ingrandimento all'avanguardia che permette la visualizzazione dei dettagli più sottili delle lesioni sospette, con un ingrandimento fino a 135x*1. Queste prestazioni ottiche avanzate sono ulteriormente rafforzate dalla funzionalità NBI (Narrow Band Imaging), per un'osservazione ancora più selettiva, favorendo una maggiore accuratezza e sicurezza diagnostica.




Immagine a luce bianca

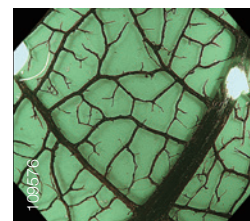

Ingrandimento ottico 135x con NBI

Modalità High FPS (Frame Per Second)

Il modello CF-XZ1200L/I utilizza un metodo di scansione sequenziale per produrre immagini endoscopiche. Inoltre, grazie alla presenza di un chip CMOS proprietario, il colonscopio CF-XZ1200L/I offre una modalità High FPS (Frame Per Second)*2 in grado di acquisire immagini a 120 fotogrammi al secondo. Questo aiuta a ridurre al minimo lo sfarfallio e le sbavature di colore.

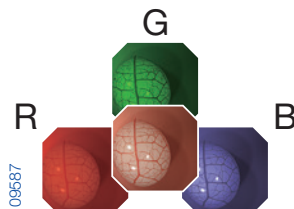

Distanziale MAJ-1991

Per risultati ottimali, si raccomanda l'uso del distanziale MAJ-1991. Particolarmente utile con gli endoscopi a ingrandimento, questo dispositivo aiuta a mantenere una distanza ottimale dalla mucosa, facilitando così la messa a fuoco.



Controllo preciso dell'ingrandimento tramite leva dello zoom

La leva dello zoom manuale in dotazione permette di regolare il rapporto di ingrandimento con maggiore precisione, per ottenere un'immagine endoscopica ingrandita che meglio si adatta alle vostre esigenze.



Altre funzionalità

- ErgoGrip: sezione di controllo migliorata
- RIT (Tecnologia di inserzione responsiva)
- Compatibile con TXI, RDI e NBI quando collegato al CV-1500
- Angolo di visualizzazione ampio di 170°
- Connettore One-Touch impermeabile

*1 Con MONITOR LCD OEV321UH 4K UHD. *2 Disponibile solo quando connesso al CV-1500.

Specifiche		
Sistema ottico	Campo visivo	Larghezza: 170° Tele: 90
	Direzione visiva	Visione frontale
	Profondità del campo	Normale: 7 - 100 mm Tele: 1 - 2 mm
Tubo di inserimento	Diametro esterno del terminale distale	ø 13,2 mm
	Terminale distale allargato	
Canale operativo	Diametro esterno della sonda di inserimento	ø 12,8 mm
	Lunghezza operativa	L: 1680 mm I: 1330 mm
	Diametro interno del canale	ø 3,7 mm
Canale irrigazione ausiliario	Distanza visibile minima*3	3 mm (modalità fuoco normale)
	Direzione in cui gli accessori transendoscopici entrano ed escono dall'immagine endoscopica	
Canale irrigazione ausiliario	Direzione da cui il getto d'acqua appare nell'immagine endoscopica	

*3 Distanza dal terminale distale dell'endoscopio.



EVIS X1 VIDEOCOLONSCOPIO CF-XZ1200L/I

Considerata la costante evoluzione delle conoscenze mediche, possono essere necessarie modifiche tecniche o variazioni del design del prodotto, delle specifiche del prodotto, degli accessori e delle offerte di servizi.